



So verwenden  
Sie Ihre  
ScanBox <sup>pro</sup>  
richtig



**DentalMonitoring**  
Smarter Orthodontics


# Starten Sie die DentalMonitoring-App.

**Waschen Sie sich vor jedem Scan die Hände gründlich mit Wasser und Seife.**

**Stellen Sie sich vor einen Spiegel, vergewissern Sie sich, dass:**

- Ihr Kameraobjektiv sauber ist.
- die Lautstärke Ihres Smartphones laut genug eingestellt ist, um die Audio-Anweisungen zu hören.

## Setzen Sie Ihr Smartphone in die Halterung ein.

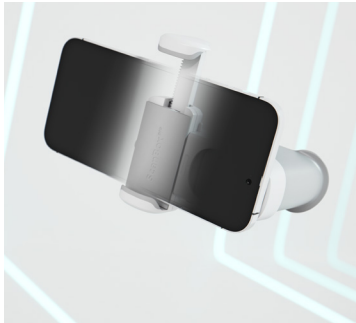

### Do

- Setzen Sie Ihr Smartphone in die ScanBox<sup>pro</sup> ein. Vergewissern Sie sich, dass das Objektiv Ihrer Kamera und das Blitzlicht sauber und durch die Öffnung der ScanBox<sup>pro</sup> sichtbar sind.
- Setzen Sie Ihr Smartphone in die Halterung ein, indem Sie die seitliche Öffnungstaste drücken und legen Sie es mit der Rückseite so in die Halterung, dass der rückwärtige Blitz und das Objektiv an dem Fenster ausgerichtet sind. Damit das Smartphone in die Halterung passt, kann es notwendig sein, die Schutzhülle vorher abzunehmen.
- Drücken Sie Ihr Smartphone fest an, um es zu fixieren, und vergewissern Sie sich, dass es fest sitzt.
- Stellen Sie die Position des Fensters ein, indem Sie den Einstellknopf gedrückt halten und die Halterung vertikal so weit verschieben, bis Sie das Objektiv und den Blitz durch das Fenster sehen können.

### Don't

- Setzen Sie Ihr Smartphone nicht verkehrt herum ein.

## Verwenden Sie ein Wangenhalterrohr, das Ihrer Mundgröße entspricht.

### Do

• Benutzen Sie immer ein Wangenhalterrohr, das Ihrer Mundgröße entspricht. Zähne und Zahnfleisch müssen nach dem Einführen des Rohrs deutlich sichtbar sein. Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

### Don't

- Verwenden Sie kein zu kleines Wangenhalterrohr. Sonst könnte ein Teil Ihrer Zähne nicht sichtbar sein.
- Verwenden Sie kein zu großes Wangenhalterrohr, da dies zu Schmerzen oder Verletzungen führen könnte.

# Setzen Sie das Wangenhalterrohr in die Smartphone-Halterung ein.



## Do

- Befestigen Sie das Wangenhalterrohr an der Smartphone-Halterung. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn es eingerastet ist.
- Die App gibt Ihnen Anweisungen, um sicherzustellen, dass das Wangenhalterrohr korrekt zentriert ist.

## Don't

- Versuchen Sie nicht mehr als ein Wangenhalterrohr zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das falsche Ende des Wangenhalterrohrs mit der Smartphone-Halterung zu verbinden.

# Führen Sie das Wangenhalterrohr in Ihren Mund ein.

## Do

- Führen Sie das Wangenhalterrohr zuerst mit der einen, dann mit der anderen Seite in Ihren Mund ein.
- Zähne und Zahnfleisch sollten vollständig sichtbar sein, ohne dass Sie sich unwohl fühlen.

## Don't

- Beißen Sie nicht auf das Wangenhalterrohr. Es sollte Ihre Lippen von den Zähnen fernhalten.
- Halten Sie das Wangenhalterrohr nicht außerhalb Ihres Mundes. Sie müssen das Wangenhalterrohr einführen, bevor Sie mit dem Scannen beginnen.

Bei technischen Fragen zur App steht Ihnen auch das DentalMonitoring Support-Team gerne zur Verfügung. Sie können sich über folgende E-Mail-Adresse an uns wenden:

**[support@dental-monitoring.com](mailto:support@dental-monitoring.com)**.



# Tippen Sie zwei Mal auf den Bildschirm, um den Scan zu starten.



## Do

- Folgen Sie den Punkten auf dem Bildschirm, um sicherzustellen, dass alle Zähne, auch die hinteren, gescannt werden.
- Ihre Bewegung sollte zentriert bleiben. Nur Ihre ScanBox<sup>PRO</sup> und Ihr Smartphone bewegen sich, nicht aber Ihr Kopf.
- Bewegen Sie sich in Ihrem eigenen Tempo, um alle Punkte zu erfassen.
- Atmen Sie durch die Nase, damit das Kameraobjektiv nicht beschlägt.

## Don't


- Strecken Sie die Zunge nicht vor Ihre Zähne.

Wenn Sie Fragen zu DentalMonitoring oder zum Scanvorgang haben, wenden Sie sich bitte über die DentalMonitoring-App an Ihren Arzt oder das Praxisteam.


**Sie kennen Ihren aktuellen Behandlungsverlauf.**

# Entdecken Sie die ScanBox<sup>PRO</sup>


## Smartphone-Halterung

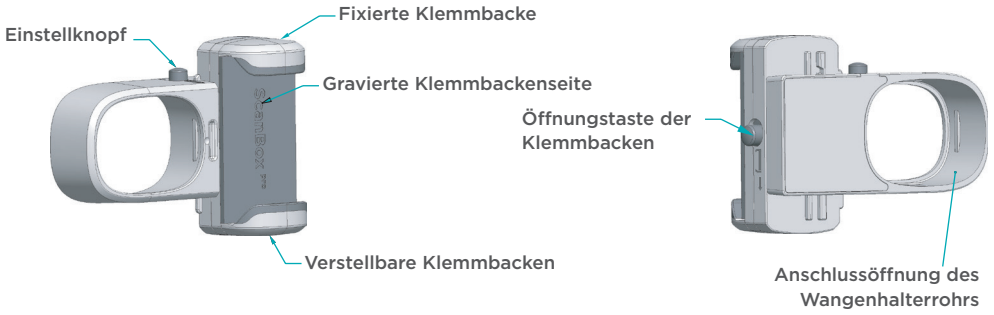


## Wangenhalterrohr

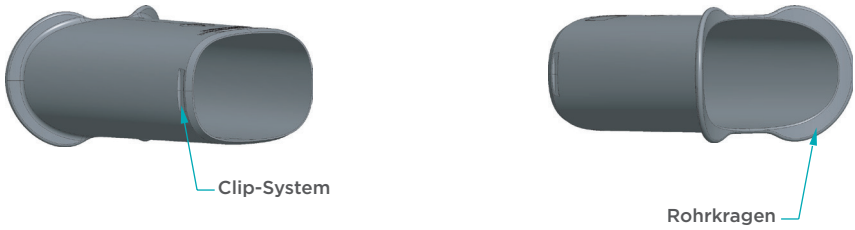

Vorderansicht der ScanBox<sup>PRO</sup> nach Einsetzen des Smartphones.

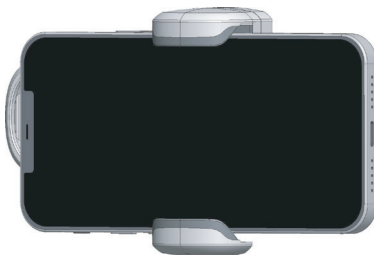

Rückansicht der ScanBox<sup>PRO</sup> nach Einsetzen des Smartphones.

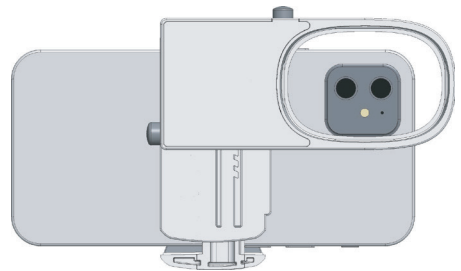



# DentalMonitoring

Smarter Orthodontics



Die DentalMonitoring-App ist im App Store oder bei Google Play erhältlich.

DentalMonitoring, SmileMate und Vision sind Produkte, die von Dental Monitoring SAS unter dem Markennamen DentalMind für Health Care Professional (HCP) entwickelt und hergestellt werden. Sie werden auch von Patienten unter der obligatorischen Aufsicht von Health Care Professional (HCP) verwendet. DentalMonitoring und SmileMate wurden entwickelt, um HCP bei der Fernbeobachtung intraoraler Situationen zu unterstützen (und kieferorthopädische Behandlungen für DentalMonitoring zu überwachen). Wenden Sie sich vor der Verwendung an Ihren HCP und/oder die Gebrauchsanweisung. Das DentalMonitoring-Produkt ist ein Medizinprodukt (nur in Europa), das als solches registriert ist und das CE-Zeichen trägt. Die Bildsimulationen werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt, sie sind nicht vertraglich bindend und können von den endgültigen Ergebnissen der Behandlung des Patienten abweichen. Die Verfügbarkeit der Produkte, die Ansprüche und der Zulassungsstatus können sich je nach den örtlichen Vorschriften von Land zu Land unterscheiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Vertreter. AD\_HDW\_BR\_007\_01\_rd\_P\_DE\_de